

## Gjennomføring av hurtigtest for Covid-19

### Til klassen

- Elevene spriter hender før selvtesting starter
- Testansvarlig tar med kassen til klassen og deler ut pappkrus med innhold til elevene (reagensrør, testbrikke, pinne og konvolutt)
- Elevene tar konvolutt, testpinne og testbrikke ut av pappkruset (lar testglasset stå)
- Elevene skriver navn og klasse på konvolutt med blokkbokstaver
- Elevene gjør klar for testing ved å ta ut pinne og brikke av emballasjen og skru av lokket på testglasset. Sett testglasset forsiktig tilbake i pappkruset slik at dette ikke velter
- Elevene gjennomfører testingen. Hodet holdes i normal stilling, og pinnen med vatt/pute på tuppen føres inn i nesens, slik at fremre del av pinnen (med vatt/pute) føres langs bunnen av nesekanalene, mens selve skaftet / pinnen holdes mot øvre del av nesekanalene, se figur under.
- Eleven setter testpinnen i testglasset, rører rundt fem ganger, løfter opp pinnen til midten av glasset, klemmer ut væsken, løfter pinnen til knekkpunktet, knekker pinnen og setter på lokket
- På signal fra lærer drypper elevene 5 dråper fra testglasset i "brønnen" på brikken som er vist med dråper
- Testansvarlig noterer klokkeslett
- Elevene skyver brikken inn i konvolutt
- Testansvarlig samler inn konvolutter i plastesken og tar med til kontrollrommet
- Ressursperson går rundt med plastsekk og ber elevene kaste brukte kit i sekken

### Kontroll

- Testbrikkene kontrolleres 15 minutter etter elevene har dryppet på brikkene og lagt dem i konvolutt
- En strek, negativ test, to streker positiv test
- Ved positivt resultat kontaktes rektor/assisterende rektor. Hver enkelt elev informeres deretter enkeltvis om de skal i isolasjon/karantene.

